


Įrankis PD matavimui = Atstumas tarp vyzdžių

(PD = Pupillary distance = Atstumas tarp vyzdžių)

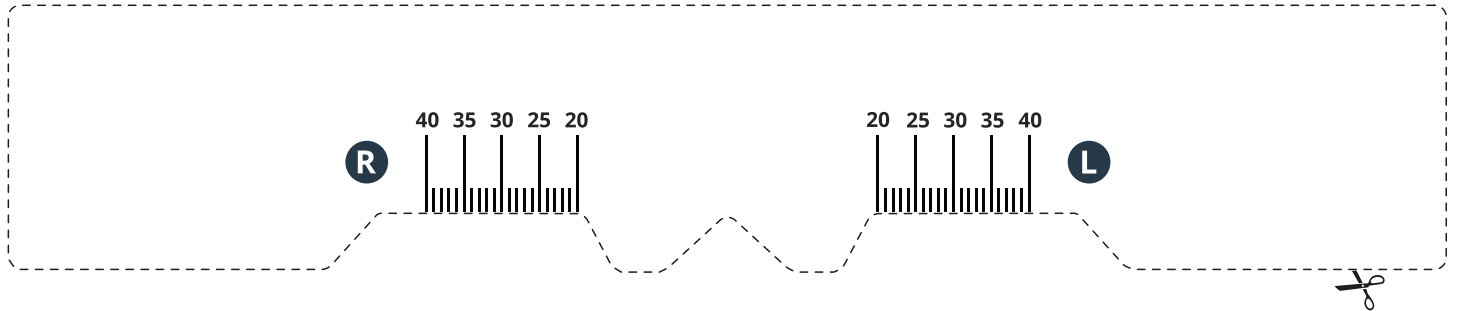

Kaip pasimatuoti atstumą tarp vyzdžių -PD?

1. Atsispausdink visą puslapį nekeisdamas formato.

2. Liniuotės pagalba patikrink ar matavimo juostelės vertės tikslios (1m turi būti 1cm!)

3. Išsikirpk matavimo juostelę

4. Dabar, sekdamas instrukcijas, pasimatuok savo PD:

- Užsidėkite matavimo juostelę taip, kaip kad užsidėtumėte tikrus akinius (ant nosies tilto)
- Jei matavimus atliekate pats, atsistokite priešais veidrodį. Žiūrėkite tiesiai ir matavimo juostelėje pažymėkite, abiejų vyzdžių poziciją (atstumas matuojamas nuo nosies tilto).
- Matavimus daug lengviau atlikti, jei kažkas kitas jums padeda. Tokiu atveju, jūs tiesiog turite tvirtai laikyti matavimo juostelę, kol kitas asmuo pažymės atstumą tarp abiejų akių vyzdžių, kairės (L) ir dešinės (R).
- Dabar galite pasirinkt atstumo tarp vyzdžių PD vertes parduotuvės www.alensa.lt užsakymo formoje. Taip pat pasirinkite paskirtų akinių dioptrijų vertes.

